

Behelfsmaske

Die Maske kann dazu beitragen, den Kontakt der Hände mit dem Gesicht und die Ausbreitung des vom Benutzer der Maske ausgeatmeten Aerosols (laufende Nase, Husten) zu begrenzen.

Die Maske bietet keinen vollständigen Schutz gegen Mikroben und Viren.

Das Produkt ist kein Medizinprodukt. Das Produkt ist nicht steril, garantiert keine therapeutische Wirkung und Sie verwenden es auf eigenes Risiko.

Wenn Sie nach dem Anlegen Schwierigkeiten beim Atmen haben, entfernen Sie die Maske sofort.

Minderjährige dürfen das Produkt nur mit Zustimmung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten und unter deren Aufsicht verwenden.

Nehmen Sie die Maske vor dem Schlafengehen ab und verwenden Sie es nicht während Aktivitäten, die zu einem Verwickeln oder Festziehen des Gummibands am Hals des Benutzers führen könnten.

Leihen Sie die Maske nicht aus. Die Maske kann nur von einer Person verwendet werden. Die Maske muss vor jedem Gebrauch dekontaminiert werden. Es wird empfohlen, das Produkt alle zwei Stunden zu dekontaminieren.

Wenn Sie einen Einwegfilter in Form eines Taschentuchs verwenden, ersetzen Sie ihn alle 30 Minuten. Die Maske kann nach vorheriger Dekontamination mehrmals verwendet werden.

ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DER MASKE

1. Entnehmen Sie die Maske aus der Verpackung.
2. Binden Sie einen Knoten am Gummiband.
3. Passen Sie die Länge des Gummibandes an.
4. Zusätzlich kann die Maske mit einem Einwegfilter ausgestattet werden. Der Filter kann beispielsweise ein Taschentuch oder ein Papiertuch sein. Setzen Sie es in die Maske ein.
5. Setzen Sie die Maske auf Ihr Gesicht.
6. BERÜHREN SIE DIE VORDERE OBERFLÄCHE DER MASKE NICHT, WÄHREND SIE SIE VERWENDEN!
7. REINIGEN ODER DESINFIZIEREN SIE IHRE HÄNDE BEVOR SIE DIE MASKE ABSETZTEN!
8. Setzen Sie die Maske ab, indem Sie nur die Gummibänder greifen.
9. Entsorgen Sie den Einwegfilter und waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände erneut. Das ist sehr wichtig.
10. Kochen Sie die Maske 30 Minuten lang in kochendem Wasser.

Dekontamination

Anweisungen zum Reinigen der Maske:

Die Maske kann 2 Stunden lang verwendet werden. Reinigen Sie sie nach zwei Stunden oder tauschen Sie sie gegen eine neue aus. Wenn ein Einwegfilter verwendet wird, z. B. ein normales Gewebe, sollte dieser alle 30 Minuten ausgetauscht werden. Waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände jedes Mal gründlich, wenn Sie die Maske berühren.

Die Maske kann nur von einer Person verwendet werden, da die Dekontamination nicht zu 100% schützt und so Krankheiten, zwischen Menschen übertragen werden, indem dieselben Gegenstände verwendet werden.

Anleitung:

1. Falten Sie die Maske vor dem Reinigen und wickeln Sie diese mit einem nicht gewebten Gummiband oder einer Schnur ein. Falls Sie die Maske erst später reinigen können, so Bewahren Sie die Maske auf indem Sie diese in eine Plastiktüte legen. Achten Sie darauf Ihre Hände gründlich zu waschen oder zu desinfizieren.
2. Legen Sie die Maske in kochendes Wasser und kochen Sie diese 30 Minuten. Wasche oder desinfizieren Sie gründlich Ihre Hände wieder. Dieser Vorgang ist sehr wichtig.
3. Entnehmen Sie die Maske nach 30 Minuten vorsichtig aus dem Wasser. Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen. Sie können eine Zange oder ein anderes Gerät verwenden.
4. Trocknen Sie die Maske im gefalteten Zustand.
5. Wenn die Maske während der Reinigung nicht mit einem Gummiband oder einer Schnur fixiert wird, kann sich das Maskengewebe gerade ziehen und somit den plissierten Effekt verlieren. Dieses kann das Anlegen und Verwenden der Maske erschweren.
6. Der plissierte Effekt des Gewebes wirkt sich nicht direkt auf die Qualität der Maske aus.

Entsorgen Sie die gebrauchte Maske nicht ungeschützt, da dies die öffentliche Gesundheit gefährden kann! Die verwendete Maske sollte dekontaminiert, dann in einen dicht verschlossenen Beutel (z. B. eine Verpackung) gegeben und in einem Behälter entsorgt werden.

Zusammensetzung: Vliesstoff (Polypropylen), Gummiband (oder Polyesterschnur) in einem Geflecht, das Polyamid-, Polyester- und elastoidale Fasern enthält. **Nicht von Personen verwenden, die gegen die oben genannten Inhaltsstoffe allergisch sind.**

Die Maske ist nach STANDARD 100 von OEKO-TEX® geprüft.